



Инструкция по первичной настройке  
**Корректор осанки Xiaomi HiPee P2 Smart**  
**Posture Corrector**  
для клиентов интернет-магазина  
«Mi-Home»

## Благодарим за выбор **Корректора осанки Xiaomi HiPee P2 Smart Posture Corrector**



Чтобы начать использовать корректор P2 необходимо произвести первоначальную настройку

1. Зарядить устройство.
2. Выключить устройство, если оно включено (зажать кнопку на 4 секунды).
3. Сесть вертикально ровно.
4. Надеть на шею выключенное устройство.
5. Зажать и удерживать кнопку включения зажатой 10 секунд, пока устройство не издаст два вибросигнала. Затем отпустить.
6. Затем один раз нажать на кнопку, устройство издаст вибросигнал.
7. Всё, устройство готово к использованию. Теперь, при изменении положения, устройство будет вибрировать, напоминая об изменении положения.